


採取した検体を検査する

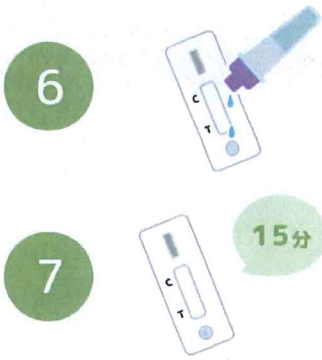

6


抽出緩衝液チューブの白い蓋を外します。
検体を混ぜた抽出緩衝液を 3 滴ほどテスト窓に垂らしてください。

7

15分


滴下後、**15分**お待ちください。
必ず、**検査液滴下後 10~15 分後に出た結果**で判断してください。
(15 分を大幅に超えた後の結果は正しくありません。)

結果を確認する

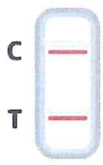


陽性反応

「C」と「T」の両方ともに線がついた場合、陽性反応です。
直ちにオンライン診察のご予約をお願いいたします。

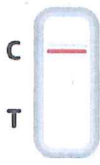

陰性反応

「C」のみに線がついた場合、陰性反応です。

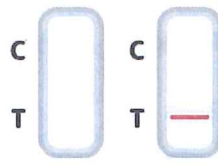

無効な反応


「C」に線が何もついていない場合、無効な結果です。
(新しいキットで再検査してください。
再送手続きは運営事務局へ写真の添付とともにお問い合わせください。)

オンライン診察のご予約方法

1 以下 QR コードを読み取り、遠隔医療アプリ「Calling for Telemedicine」をダウンロードします。




2 アカウントの登録を行います。

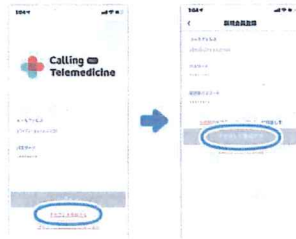

3 認証メールが届きます。ログイン後、医療機関一覧で「医療機関の追加」をクリックします。



4 医療機関 ID を入力、もしくは QR コードを読み取り、「Chekmed・MedLab・MedQuick」が表示されたら医療機関を追加をクリックします。

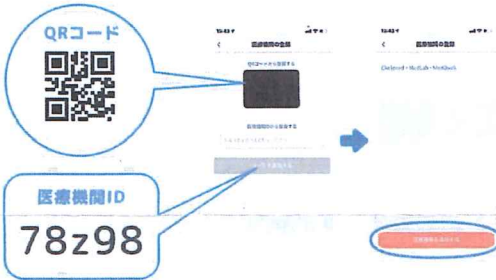

5 医療機関一覧から「Chekmed・MedLab・MedQuick」を選択、「受信者(ご本人様)」を選択、プロフィールを入力します。



6 診察券番号は入力せずに進みます。診察メニューから「※抗原検査※オンライン診察」を選択します。



7 ドクターを選択後、希望の予約日時を選択します。



8 予約日時になりましたら、アプリの予約管理画面から診察画面に入室し、医師からの指導を受けてください。

